

Široké použitie:

- riešenie difúzneho aj lokálneho krvácania
- krvácanie pozdĺž sutúr
- náhrada fibrínových lepidiel ako hemostatík v cievnej chirurgii
- náhrada kostného vosku
- zníženie potreby elektrokauterizácie a súvisiaceho poškodenia tkaniva
- možné použitie s kompatibilnými krvnými filtrami (cell savers)
- s univerzálnym aplikátorom pre všetky zákroky v miniinvazívnej chirurgii

Oblasti použitia:

- cievna, hrudná a kardiochirurgia
- všeobecná chirurgia
- transplantačná chirurgia
- traumatológia
- ústna a maxillofaciálna chirurgia
- ORL
- urológia/gynekológia
- ortopédia
- plastická chirurgia
- chirurgia popálenín
- neurochirurgia
- detská chirurgia

HaemoCer™

Práškové hemostatikum



HaemoCer™ kód ŠÚKL P 90018

HFP101	1g	5 ks/bal
HFP102	2g	5 ks/bal
HFP103	3g	5 ks/bal
HFP105	5g	5 ks/bal

HaemoCer™ flex aplikátor s výstužným prvkom, kód ŠÚKL P 99130

HFZ201	140 mm	5 ks/bal
--------	--------	----------

HaemoCer™ univerzálny aplikátor kód ŠÚKL P 97201

HFZ101	440 mm	5 ks/bal
--------	--------	----------

100%
vstrebateľné

navrhnuté
a vyrobené
v Nemecku

BioCer

BioCer Entwicklungs-GmbH

Ludwig-Thoma-Str. 36c · 95447 Bayreuth · Nemecko · Tel. +49 (0)921 78 77 70 0

Versium

Distribútor pre SR:

Versium, s.r.o

tel: +421 2 50 100 993, info@versium.sk, www.versium.sk



HDD104_01/2017-05

Ľ - rýchle - efektívne - bezpečné

BioCer

HaemoCer™

Absorbovatel'né polysacharidové hemostatikum HaemoCer™ predstavuje chránenú technológiu BioCer založenú na vlastnom procese spracovania resorbovatel'ných ultrahydrofilných polysacharidov (PURE™). HaemoCer™ je vstrebatel'né hemostatikum na rastlinnej báze bez ľudských alebo

zvieracích zložiek. Hemostáza je vyvolaná akceleráciou fyziologickej koagulačnej kaskády bez prítomnosti chemických alebo liečivých prímiesí. Nezávislé štúdie preukázali, že použitie rastlinných práškových hemostatov (polysacharidov) znižuje výskyt pooperačných adhézií.

Prírodné

- rastlinného pôvodu
- bez ľudských alebo zvieracích zložiek
- kompletná resorpcia

Bezpečné

- rýchla resorpcia znižuje riziko výskytu reakcií na cudzie látky a tvorbu granulómu
- znižuje potrebu transfúzie a autotransfúzie

efektívne

- zvýšená schopnosť absorpcie
- rýchla príprava k aplikácii
- jednoduché skladovanie bez špeciálnych nárokov

Pre najlepší výsledok voľte tento postup

Osušte

Odsávačkou alebo tampónom odstráňte prebytočnú krv.



Aplikujte

Naneste HaemoCer™ okamžite a v dostatočnom množstve na celú plochu rany. Nedotýkajte sa aplikátorom miesta krvácania.



Stlačte

Pod miernym tlakom priložte suchý gázový tampón.



Prepláchnite

Pred odstránením tampónu dostatočne zvlhčite sterilným fyziologickým roztokom, aby ste nepoškodili alebo nestrhli gélovú matricu na povrchu rany.



S pomocou prírody

Spracovanie absorbovatel'ného polysacharidového hemostatika HaemoCer™ procesom PURE™ zahŕňa zložitý postup siet'ovania polymérových reťazcov a vytvárania vysoko-hydrofilných biokompatibilných častíc.

Vďaka duálnemu mechanizmu účinku HaemoCer™ pri kontakte s krvou najprv zosilňuje prirodzenú koagulačnú kaskádu pomocou rýchlej dehydratácie krvi a ďalej urýchľuje koncentráciu krvných doštičiek, červených krviniek a koagulačných proteínov v mieste krvácania.

Druhý mechanizmus účinku hemostatika HaemoCer™ spočíva vo vytvorení silnej gélovej matrice, ktorá prilnie k tkanivu a pôsobí ako mechanická bariéra ďalšiemu krvácaniu.

HaemoCer™ polysacharidové hemostatikum neobsahuje žiadne ľudské alebo zvieracie zložky a je amylázou rýchlo a úplne vstrebatel'né v priebehu 48 hodín.

100%
vstrebatel'né

rastlinný
pôvod

